

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕНЕ ФИЛЬТРОВ для моделей бактерицидных рециркуляторов SaltLight Combo 30

Каждые 300 часов (или раз в 2 месяца) – необходима промывка или замена фильтра.

Для этого необходимо открутить болты верхней решетки, снять решетку (которая в свою очередь соединена с фильтром) и промыть фильтрующий материал проточной водой.

Также, для очистки пор фильтрующего материала можно использовать пылесос.

При изнашивании фильтрующего материала, необходимо заменить рамку с фильтром, открутив болты, на которых она прикреплена к решетке. Фильтры вы можете приобрести на сайте www.mysaltlight.com или у Вашего менеджера.